

SIDLYCARE 2 - Instrukcja ładowania

1. Złóż ładowarkę i podłącz do prądu

- kabel USB podepnij do urządzenia ładującego
- gniazdo USB znajdziesz z boku ładowarki



2. Połóż opaskę na ładowarce

- kropka na spodzie opaski powinna trafić na kropkę na ładowarce indukcyjnej



3. Ładowanie

- po 30 sekundach **Przycisk SOS** na opasce podświetli się kolorem zielonym i czerwonym
- opaska będzie w pełni naładowana po ok. 3 godzinach



4. Opaska naładowana

- opaska poinformuje o pełnym naładowaniu baterii komunikatem głosowym "*bateria naładowana*"
- **przycisk SOS** zaświeci się cały na zielono



5. Opaska gotowa do nałożenia

- zdejmij opaskę z ładowarki, opaska jest gotowa do założenia na rękę
- jeśli opaska jest bardzo ciepła odczekaj chwilę przed jej założeniem

Obsługa klienta:
+48 887 772 391
helpdesk@sidly.org
godziny pracy 9:00-17:00

Instrukcje również znajdziesz na: www.sidly.eu/manual/ladowanie.pdf