

SIDLY One



PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DO ŚCIĄgniĘCIA:
www.sidly-care.eu/manual/sidly_one.pdf


KROK #1

Przed użyciem całkowicie naładuj urządzenie (około 2 godzin)



KROK #2

Umieść opaskę na nadgarstku


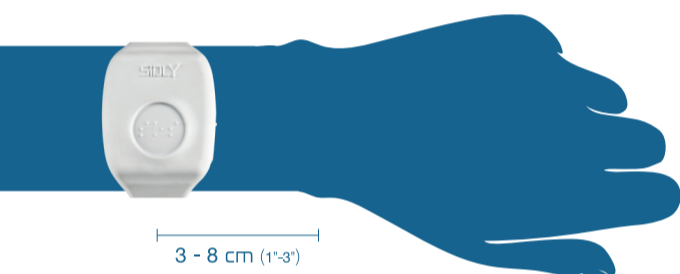


KROK #3

Dokonaj rejestracji na stronie sidly-platform.com lub innej dostarczonej przez dystrybutora.




sidly-platform.com

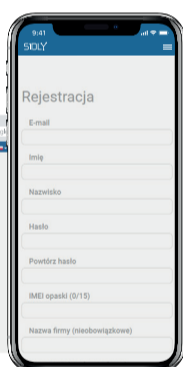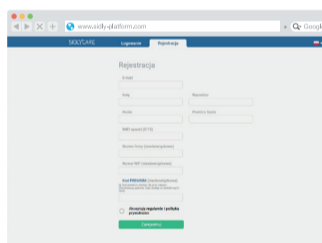

KROK #4

Ściągnij aplikację SIDLY Care ze sklepu Google Play lub AppStore i miej dostęp do danych w każdej chwili.

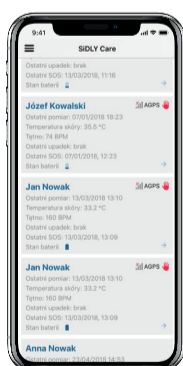

KROK #5

Zaczekaj na wiadomość SMS potwierdzającą skonfigurowanie urządzenia.

Gratulujemy!

Twoja SiDLY została skonfigurowana i jest gotowa do użycia.

13:19


KROK #6

OD TERAZ MOŻESZ W PEŁNI KORZYSTAĆ Z FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA SYSTEMU SIDLY

KROK #7


Pamiętaj, że opaska generuje sygnały świetlne i dźwiękowe, które wskazują aktywność jej funkcjonalności.

Np. migająca dioda zielona oznacza poprawną pracę urządzenia.

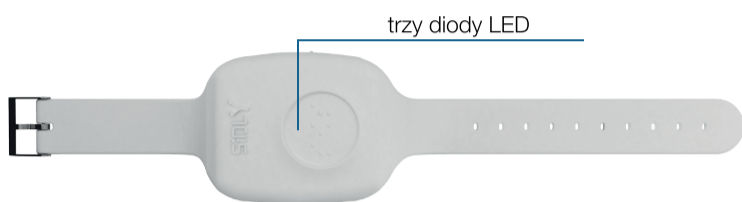

KROK #8

Informacje o alertach oraz pozostałe dane z urządzenia możesz regularnie sprawdzać również na aplikacji mobilnej oraz platformie internetowej.

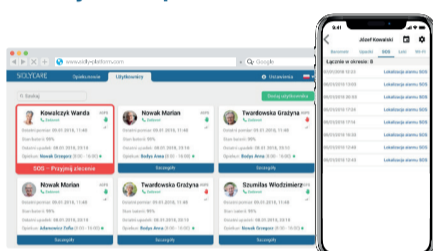

KROK #9

Urządzenie wyśle także na podany w systemie numer telefonu wiadomość o upadku lub naciśnięciu przycisku SOS wraz z lokalizacją.

Uwaga - SOS!
obszar lokalizacji:
<http://www.openstreetmap.org/#map=18/52.218357/21.045324>

12:43

KROK #10

W razie problemów zawsze możesz sięgnąć do instrukcji obsługi.

Pełna instrukcja obsługi znajduje się w formie elektronicznej na stronie:

www.sidly-care.eu/manual/sidly_one.pdf

Miłego użytkowania!

Miniinstrukcja korzystania z Twojej opaski SiDLY

- — — — — poprawne działanie urządzenia
- - - - - niski poziom naładowania baterii
- — — — — naciśnięcie przycisku SOS

— — — — — dioda ciągła - - - - - dioda migająca

05/2018